

# Notice d'informations et d'utilisation recommandations AFNOR SPEC S76-001

## MASQUE BARRIERE en tissu


Le dispositif “ Masque barrière “ est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation physique.

**AVANT LA PREMIERE UTILISATION IL FAUT IMPERATIVEMENT PROCEDER AU LAVAGE DU MASQUE** suivant les recommandations que vous trouverez ci-dessous

### METTRE UN MASQUE BARRIERE

Pour être efficace le masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est recommandé de le porter sur une peau nue et de respecter les étapes suivantes :

- se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque

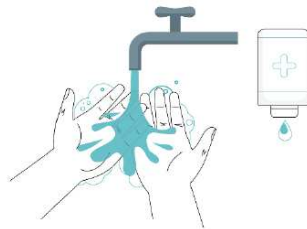

- pour une réutilisation de masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations mentionnées ci-dessous



- Place le masque barrière sur le visage, la barrette nasale (si existante) sur le nez



- Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques ou les liens en étoffe du jeu de brides derrière la tête, de part et d'autre des oreilles, sans les croiser



- Abaisser le bas du masque barrière sous le menton




- Vérifier que le masque couvre bien le menton
- Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez



- vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Pour cela il convient de contrôler l'étanchéité et la gêne respiratoire. Pour vérifier l'étanchéité, couvrir le masque d'un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage (ne pas utiliser un sac plastique)



- une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique

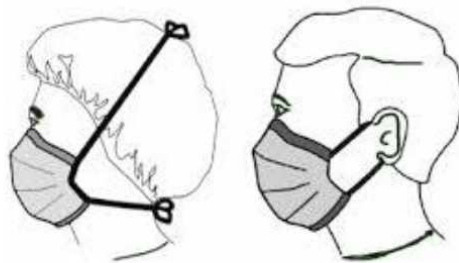

Positionnement du jeu de brides selon les modèles

## **RETIRER UN MASQUE BARRIERE**

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Pour cela, il est recommandé de :

- le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection,
- se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique,
- retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les liens du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière,
- placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre),
- se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique,
- nettoyer l'extérieur du contenant spécifique (sac plastique) avec un produit nettoyant



## **LAVER ET SECHER UN MASQUE BARRIERE**

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière à laver et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques.

Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage ,lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Il ne doit pas sécher à l'air libre. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.

Attention : il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.

Une inspection visuelle (avec gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre défaut d'ajustement, déformation, usure, etc.) le masque barrière doit être jeté.

## JETER UN MASQUE BARRIERE

Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d'un sac plastique. Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.

## DUREE D'UTILISATION DU MASQUE BARRIERE

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.



Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé.

Durant une même période de 4 heures, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.


Dans tous les cas la durée de port du masque sera de 4 heures maximum.



## CE QU'IL FAUT EVITER :

- le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques,

- le masque barrière ne doit pas être congelé. L'agent viral est conservé et à 4°C il ne perd pas son caractère infectieux,
- les règles de distanciation physique doivent être respectées malgré le port du masque barrière.

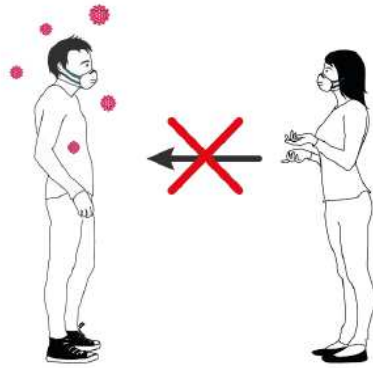

**L'ensemble des bénévoles qui ont participé à la fabrication des masques barrières en tissu, l'ont fait selon les recommandations AFNOR SPEC avec le plus grand soin et dans le respect des gestes barrières et les règles de distanciation physique.**